

ETHYLEC

éthylotest électronique à capteur électrochimique
Conforme à la norme NFX 20-704



Composition de la mallette

- 1 Ethylotest électronique « ETHYLEC ».
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour.
- 1 Pile 9V alcaline.
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack.
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport.
- 1 Notice d'utilisation multilingue.

Présentation du produit

L'ETHYLEC est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique, technologie utilisée pour les éthylotests des forces de l'ordre, elle garantit une grande fiabilité.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYLEC vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

AUTO-DEPISTAGE

=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION


Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas

Caractéristiques techniques


- Capteur ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage 15 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle : 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/L
- Rappel : Seuil contraventionnel 0,25 mg/L - Alarme sonore + message «HI» si seuil atteint
- Utilisation : 10°C - 40°C
- Stockage : 0°C - 50°C
- Compteur de test avec alarme de re-calibrage
- Calibrage : 12 mois ou 1.200 tests au premier terme échu
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Pile pour 500 tests environ
- Indicateur de batterie faible

› Descriptif du produit

ETHYLEC

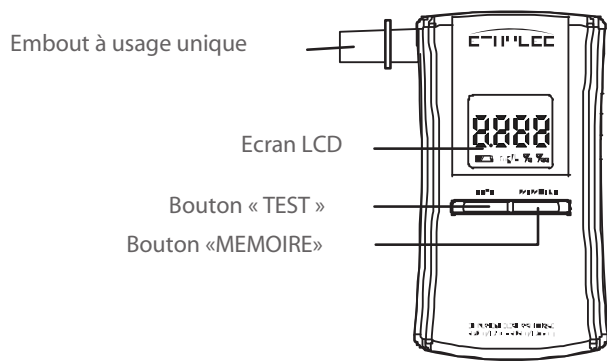


Sortie de souffle,
Attention : ne jamais obstruer.
Alimentation
DC 12V allume cigare

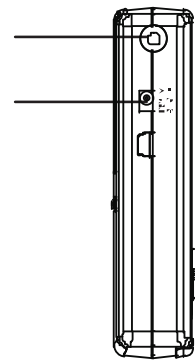


› Mode d'emploi

- Insérez un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

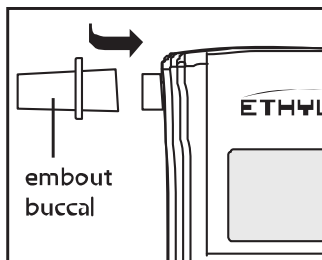

- Appuyez et maintenez le bouton «TEST». Relâchez une fois l'appareil allumé.

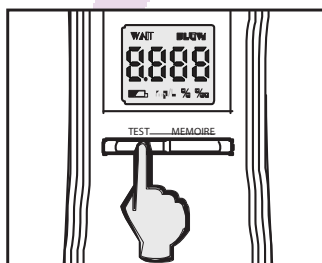


- Le mot «WAIT» (patientez) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.



- Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « [] » défile. Inspirez et soufflez dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).



- Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « [] » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.

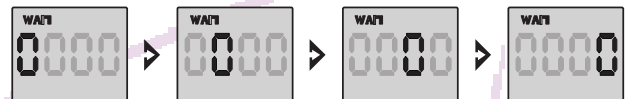

- Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Si le résultat dépasse 0,24mg/l le mot «HI» s'affiche et une alarme retentit.





- L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct.



› Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.

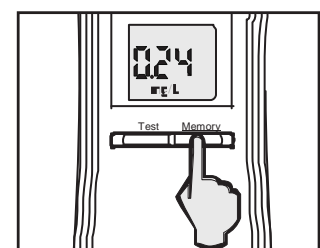

 Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre